



Profides

www.profides.uz

**DEZINFEKSIYALOVCHI VOSITA
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО**



**+998 93 500 98 80
+998 99 983 88 77**



НЕ
СОДЕРЖИТ
ХЛОР

PROFIDES

дезинфицирующее и моющее
средство
- 2 в 1 -

не требуется добавление
моющих средств

1. Для дезинфекции и
стерилизации инструментов,
ДВУ, ПСО.

2. Для Текущей и Генеральной
уборки и дезинфекции
поверхностей и транспорта.



PROFIDES

Химический состав:

ЧАС, Третичный амин, Гуанидин, Поверхностно Активные вещества (ПАВ),
Вспомогательные компоненты, Ингибиторы коррозии.

Действующие вещества:

Алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 8 %
Дидецилдиметиламмоний хлорид - 8 %
Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид - 8 %
N, N-бис (3-аминопропил) Додециламин - 4 %

Технология:

Действующие вещества химически соединены специальным образом для создания сильного синергетического эффекта.

Таким образом, если просто смешать эти вещества будет невозможно достичь тех результатов, которые показывают растворы Profides.

Дополнительно - вещества и их концентрации подобраны таким образом, чтобы усиливать и дополнять друг друга.

Благодаря мощному синергетическому эффекту 4-х действующих веществ, требуется малая концентрация ДВ в рабочих растворах для уничтожения вирусов, грибков и бактерий что позволяет не вызывать раздражения кожи рук и слизистой глаз.





Особые свойства рабочих растворов Profides:

1. Простой способ приготовления рабочих растворов - в водопроводную воду добавляется нужное количество концентрата, размешивается
2. Не обесцвечивают одежду, ткань, не портит поверхности, резину, пластик, металл, не имеет коррозионных свойств.
3. Не агрессивны по отношению к объектам обработки
4. Рабочие растворы не имеют запаха
5. Рабочие растворы применяют совмещая процессы дезинфекции и уборки
6. Обладают сильным моющим эффектом
7. Не оставляют пятен и налёта на обработанных поверхностях
8. Не раздражают кожу и слизистые, в том числе слизистую глаз
9. Действующие вещества не имеют мутагенных и тератогенных свойств
10. Дезинфекцию проводят в присутствии животных и людей
11. В насыщенных концентрациях, которые создаются в помещении при обработке, не оказывают токсичных эффектов.

Таблица 1. Приготовление рабочих растворов средства «PROFIDES»

Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Количество средства и воды необходимые для приготовления рабочего раствора объемом			
	1 л		10 л	
	Средство, мл	Вода, мл	Средство, мл	Вода, мл
0,01	0,1	999,9	1,0	9999,0
0,015	0,15	999,85	1,5	9998,5
0,02	0,2	999,8	2,0	9998,0
0,025	0,25	999,75	2,5	9997,5
0,05	0,5	999,5	5,0	9995,0
0,1	1,0	999,0	10,0	9990,0
0,2	2,0	998,0	20,0	9980,0
0,25	2,5	997,5	25,0	9975,0
0,3	3,0	997,0	30,0	9970,0
0,4	4,0	996,0	40,0	9960,0
0,5	5,0	995,0	50,0	9950,0
0,6	6,0	994,0	60,0	9940,0
0,7	7,0	993,0	70,0	9930,0
0,8	8,0	992,0	80,0	9920,0
1,0	10,0	990,0	100,0	9900,0
1,2	12,0	988,0	120,0	9880,0
1,5	15,0	985,0	150,0	9850,0
2,0	20,0	980,0	200,0	9800,0
2,5	25,0	975,0	250,0	9750,0
3,0	30,0	970,0	300,0	9700,0
3,5	35,0	965,0	350,0	9650,0
4,0	40,0	960,0	400,0	9600,0
5,0	50,0	950,0	500,0	9500,0



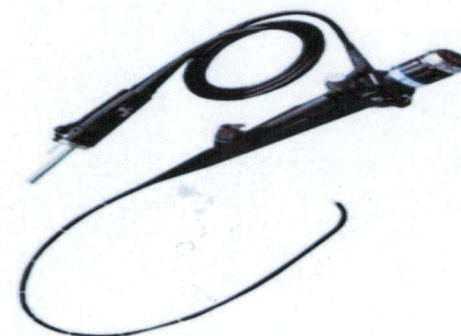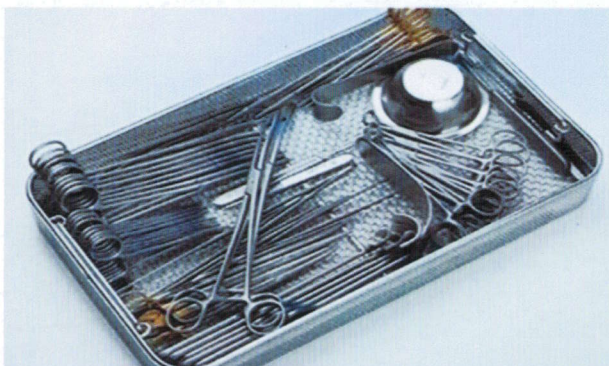

Дезинфекция медицинских инструментов


Дезинфекция инструментов - первый этап обработки, призванный сделать все изделия безопасными для медицинского персонала и исключить распространение возбудителей в окружающей среде.

Для проведения дезинфекции изделия погружают в рабочий раствор дезинфекционного средства на время дезинфекции, установленное в инструкции по применению.

Предстерилизационная очистка (ПСО) медицинских инструментов

Второй этап цикла обработки медицинских инструментов, предусматривающий удаление с инструментов белковых, жировых, механических загрязнений и остаточных количеств лекарственных препаратов.

Чрезвычайно важным условием современной эффективной технологии обработки является возможность качественной очистки инструментов. При выборе средств для дезинфекции и очистки первостепенное значение имеет отсутствие фиксирующего действия у применяемых для этого средств.

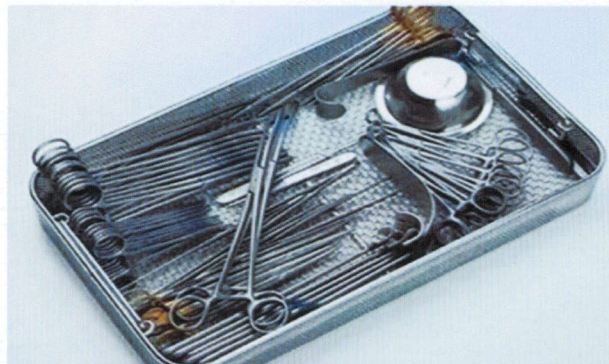



Дезинфекция +ПСО медицинских инструментов всех видов при инфекциях бактериального происхождения (кроме туберкулёза)

эквивалент гипохлорита натрия 0,5% - 60 мин

Применяют 0,01%-0,1%-е рабочие растворы «PROFIDES»

- 0.1-1 миллилитр на 1 литр воды
- Выдержка для Дезинфекции 5-30 минут
- Рабочий раствор применяется многократно
- **Срок годности рабочих растворов средства - 39 дней**

НЕ
СОДЕРЖИТ
ХЛОР

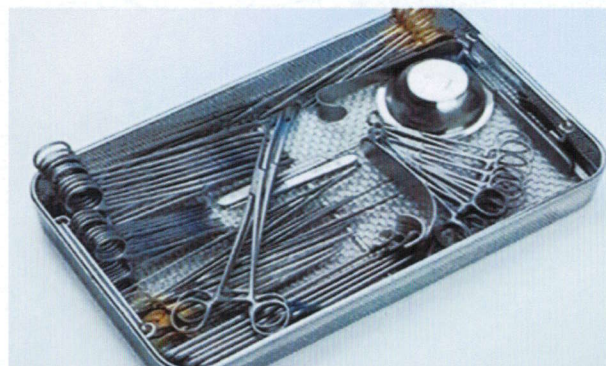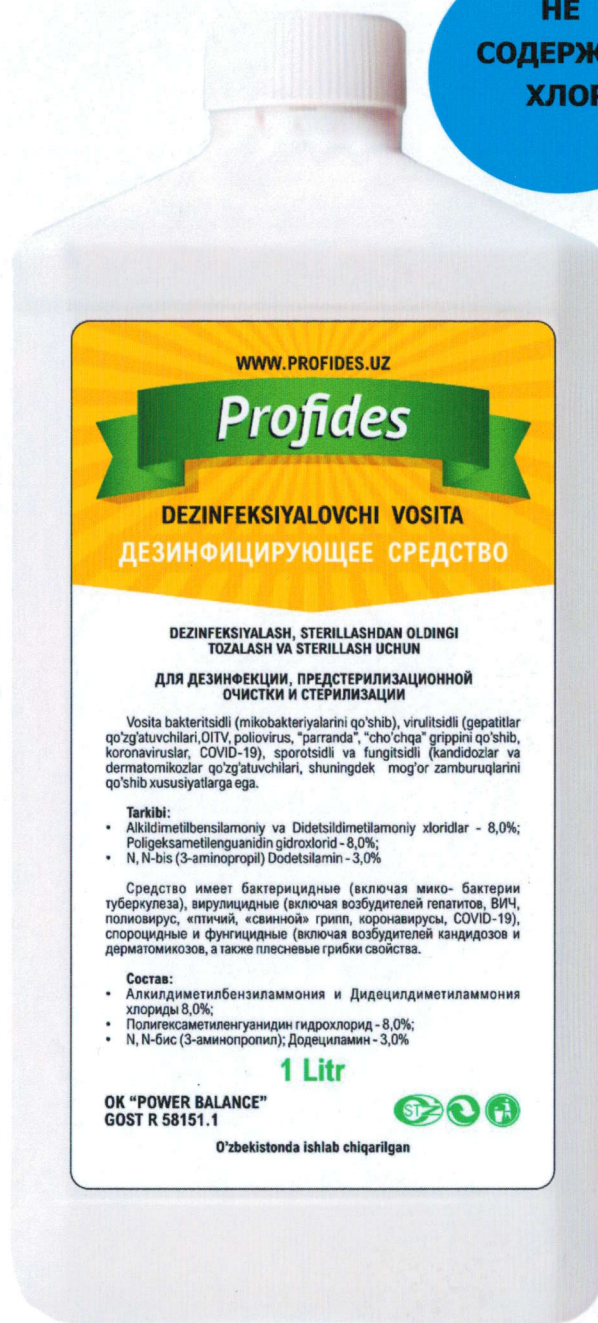

Дезинфекция +ПСО медицинских инструментов всех видов по туберкулёзу

Применяют 0,1%-0,8%-е рабочие растворы «PROFIDES»




Таблица 13 в инструкции

- 1-8 миллилитров на 1 литр воды
- Выдержка для Дезинфекции 10-60 минут
- Рабочий раствор применяется многократно
- Срок годности рабочих растворов средства - 39 дней

Таблица 13. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая инструментов и эндоскопов, хирургические и стоматологические инструменты и материалы) растворами средства «Profides» **ручным способом** при инфекциях бактериальной (включая туберкулёз), вирусной, грибковой (кандидозы, дерматофитии—Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton. Патология поражает гладкую кожу, кожные складки, волосистую часть головы, ногтевые пластины.) этиологии.

Этапы обработки	Режимы обработки		
	Концентрация рабочего раствора (по препарату),%	Температура рабочего раствора, °С	Время выдержки / обработки, мин.
Замачивания при полном погружении изделий в рабочий раствор, заполнения им полостей, каналов			
- изделий медицинского назначения из металла, стекла, пластика, резины, в т.ч. с замковыми частями, имеющих каналы и полости, зеркал с амальгамой, стоматологических инструментов, в т.ч. вращающихся	0,1 0,2 0,5 0,8 1,0	Не менее 18	60 30 15 10 5
- стоматологических материалов (оттиски, зубопротезные заготовки, артикуляторы)	0,2 0,5 0,8 1,0		30 15 10 5
- инструментов для эндоскопов	0,25 0,5 1,0 1,5		30 15 10 5



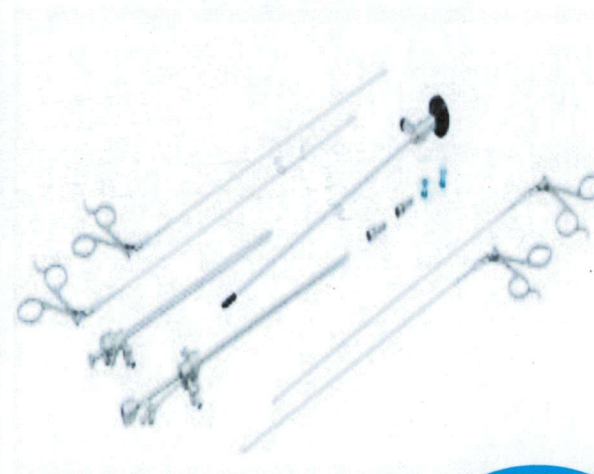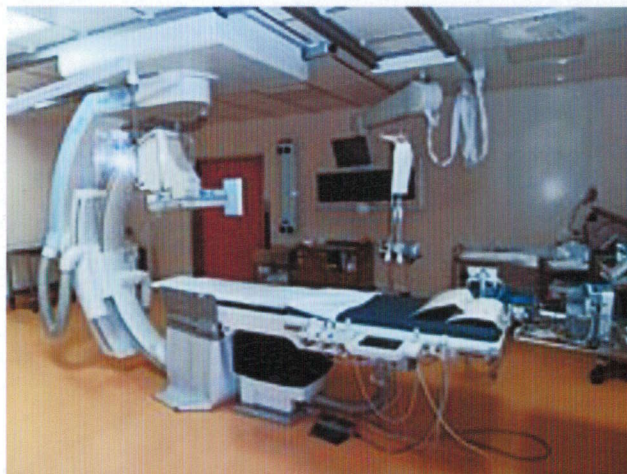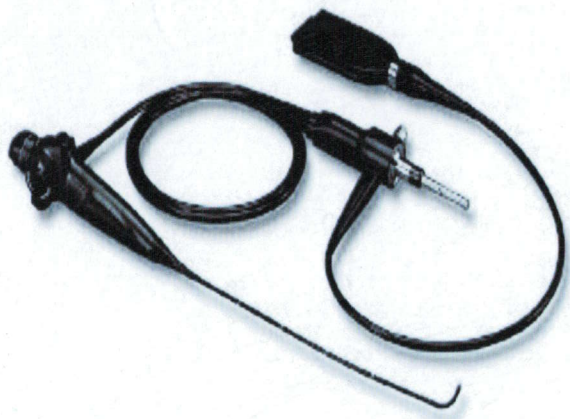


НЕ
СОДЕРЖИТ
ХЛОР




Дезинфекция высокого уровня эндоскопов

Применяют 2,5%-е рабочие растворы «**PROFIDES**»

Таблица 20 в инструкции

- 25 миллилитров на 1 литр воды
- Выдержка для ДВУ - 5 минут
- Рабочий раствор применяется многократно
- Срок годности рабочих растворов средства - 39 дней

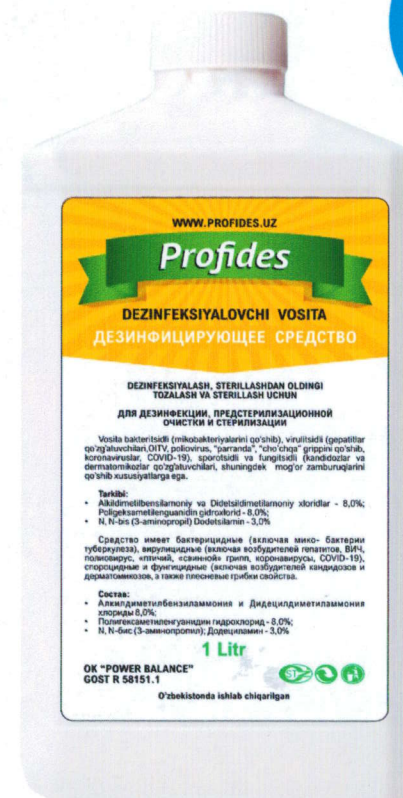

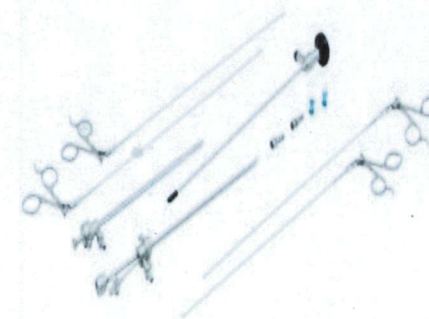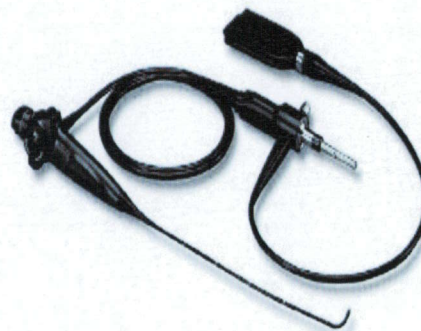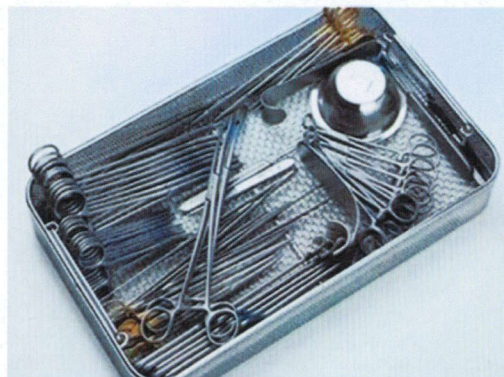

Химическая стерилизация

Медицинских инструментов всех видов

Применяют 2,5%-5%-е рабочие растворы «**PROFIDES**»

Таблица 21 в инструкции

- 25-50 миллилитров на 10 литров воды
- Выдержка для стерилизации 5-60 минут
- Рабочий раствор применяется многократно
- Срок годности рабочих растворов средства - 39 дней



НЕ
СОДЕРЖИТ
ХЛОР

Profides
www.profides.uz


DEZINFESIYALOVCHI VOSITA
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

+998 93 500 98 80
+998 99 983 88 77




PROFIDES эффективен в очагах кишечных и капельных инфекций бактериального, грибкового и вирусного происхождения

Включая туберкулез, кандидозы, дерматомикозы, гепатиты В, С, полиомиелит,
ВИЧ-инфекцию, холера H5N1 «птичий» грипп и H1N1 «свиной» грипп, корона-вирус

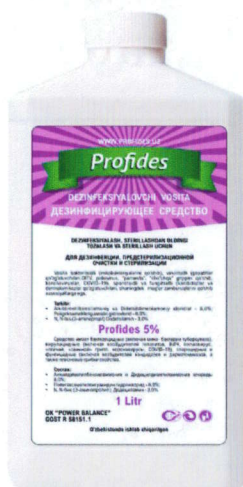



Для текущей Дезинфекции и Уборки

Дезинфекция и мойка при инфекциях бактериального происхождения (кроме туберкулеза)

Эквивалент хлорсодержащего раствора 0,5%

Применяют 0,01%-0,1%-е рабочие растворы «**PROFIDES**»

- 0.1-1 миллилитр на 1 литр воды
- Выдержка для Дезинфекции 5-30 минут
- 2 в 1 - не требуется добавление моющих средств
- Расход 100мл рабочего раствора на 1м²



Для Текущей Дезинфекции и Уборки

Таблица 2. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Profides» при кишечных и капельных инфекциях бактериальной этиологии (кроме туберкулеза)

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора (по препарату), %	Экспозиция, мин.	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, мебель, предметы обстановки, поверхности приборов, аппаратов	0,01	30	Протирание, орошение
	0,02	15	
	0,05	10	
	0,1	5	
ковровые покрытия, мягкую мебель	0,015	30	Обработка с помощью щетки
	0,02	15	
	0,05	5	
Санитарный транспорт, транспорт для перевозки пищевых продуктов, другие транспортные средства при проведении профилактической дезинфекции	0,01	30	Протирание, орошение
	0,02	15	
	0,05	10	
Санитарно-техническое оборудование	0,015	30	Протирание, орошение
	0,02	15	
	0,05	10	
Предметы ухода за больными из металлов, стекла, резины, пластмасс, клеенки	0,015	30	Погружение или протирание
	0,02	15	
	0,05	10	
Дезбарьер и дезковрик	0,02	-	Заполнение






Для Генеральной Дезинфекции и Уборки Дезинфекция и мойка поверхностей по туберкулезу

Применяют 0,1%-0,8%-е рабочие растворы «**PROFIDES**»


- 1-8 миллилитров на 1 литр воды
- Выдержка для Дезинфекции 10-60 минут
- 2 в 1 - не требуется добавление моющих средств
- Расход 100мл рабочего раствора на 1м²

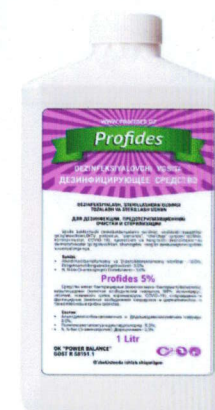

Для Генеральной Дезинфекции и Уборки

Таблица 9. Режимы дезинфекции объектов средством «Profides» при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и других учреждениях

Профиль лечебно-профилактического учреждения	Концентрация рабочего раствора по препарату, %	Экспозиция, мин.	Способ обеззараживания
Соматические отделения (кроме процедурного кабинета)	0,01	30	Протирание, орошение
	0,02	15	
	0,05	10	
	0,1	5	
Хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории, операционные, перевязочные	0,05	30	Протирание, орошение
	0,1	15	
	0,2	5	
Туберкулезные лечебно профилактические учреждения; пени-тенциарные учреждения	0,1	30	Протирание, орошение
	0,2	15	
	0,5	10	
	0,7	5	
Инфекционные лечебно-профилактические учреждения	режим при соответствующей инфекции		Протирание, орошение
Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения	0,25	60	Протирание, орошение
	0,5	30	
	1,0	15	
	1 5	10	
Детские учреждения, учреждения социального обеспечения, коммунальные объекты	0,01	30	Протирание
	0,02	15	
	0,05	10	
	0,1	5	

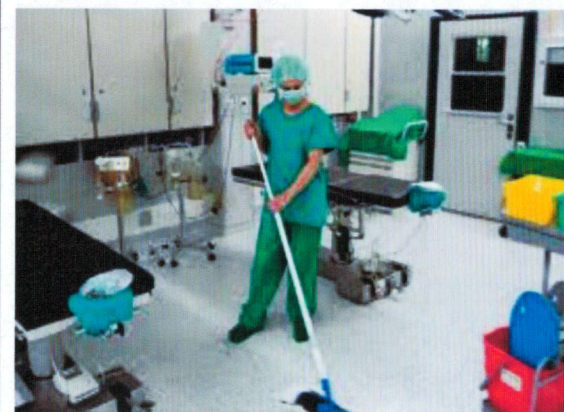

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Орган по сертификации «UzTEST» ДУК аккредитован на проведение сертификации
машин и транспортных средств сертифицированных органами, от ДЗ.АК. М. 0094

Адрес: г. Ташкент, Восточный район, улица Кавказская, дом 210, Т.а. +998 (90) 125-15-10
(наименование органа по сертификации, адрес, т.а. Государственный реестр)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Государственном реестре
от 17 августа 2023 г.
№ UZ.SMT.01.0094.97437994
Действителен до: 11 августа 2028 г.
Код ТД №53 30809411000

(подпись)

"POWER BALANCE" ОО, УЗБЕКИСТАН
(наименование предприятия, страны происхождения)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицируемые данные соответствуют:

Dezinfektsionchi vositalar, reyalavi ilonlar kiritilgan



(идентификация, наименование)
Исходя из чего

соответствует требованиям нормативной документации ГОСТ Р 54513.1-2018/иная 3.1.3 handi, 1-jahadi, 3.1.4 hand, 2-jahadi

Сфера сертификации: 7 (Сельхоз)

Земельные участки, продукция: **POWER BALANCE OJ**
(наименование продукции)

ГОРОД ТАШКЕНТ МИРЗО УЗБЕКНИН РАЙОН
(адреса и географический адрес)

Сертификат выдан на основании:
из документов "UzTest" ID qushidagi Shohing mavjudligi sertifikatini berish to'g'risidagi 250716-usul qaratil.

из следующего образца: "UzTest" ID qushidagi SN01, ID ZAK.SL.8207/иная 2023-yl 16-avgustdagi 002-81-002-813-usul, "UzTest" ID qushidagi Nastyi Ibladi SN, ID ZAK.SL.81.01/иная 2023-yl 13-avgustdagi 05-194-15-194-usul shohi bayonnomalari

из акт проверки производства Sertifikatsiylashish chikmasini ko'zda tutilgan.

Надлежащий контроль осуществляется с периодичностью:
O'zgarilmadi.

Ссылка на документ: 2023-yl 09-avgustdagi 22023-usul omborxona majmuasidan. Mavjudligi sertifikatini berish to'g'risidagi 250716-usul qaratilish shartlari to'liq rivoj qilinganda haspuri boshlanadi.

Зона соответствия предоставляется: Фискальный онлайн

Руководитель органа по сертификации: **Э.М. Mirzaeva**
Эксперт: **Э.М. Mirzaaxmetov**

974579

